

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство многофункциональное отоларингологическое для промывания ушного прохода
А-Церумен (А-CERUMEN), спрей в пластиковом флаконе

Состав на 100 г

Действующие вещества:

Поверхностно-активные вещества 43,06 г

Вспомогательные вещества: до 100 г

Форма выпуска

Спрей 40 мл в пластиковом флаконе с распылительной насадкой. Флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Свойства

Способствует растворению ушной серы и облегчает ее удаление из ушной раковины.

Предназначение

- Регулярная гигиена ушей.
- Растворение серных пробок.
- Профилактика образования серных пробок.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам.
- Отиты, перфорация барабанной перепонки, наличие трубки для вентиляции среднего уха.
- Дети до 2,5 лет.

Способ применения

Произвести по одному впрыскиванию в каждое ухо. Оставить на 1 минуту. Наклонить голову набок, чтобы из уха вытекла растворенная сера. Промыть физиологическим раствором или водой. Вытереть отделяемое из уха ватным тампоном.

При наличии серных пробок: применять утром и вечером в течение 3-4 дней.

Для регулярной гигиены ушей: применять 2 раза в неделю.

Особые указания

Во избежание раздражения не рекомендуется вставлять наконечник спрея в ушной проход глубоко.

При болезненности слухового прохода проконсультируйтесь с врачом.

Избегать попадания в глаза. Не глотать.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель:

Лаборатории ЖИЛЬБЕР, Франция
928, Авеню Генерала де Голля
14200, ЭРУВИЛЬ СЕН-КЛЭР

Претензии потребителя направлять по адресу:

ООО «Биокодекс»
107045 Москва, Последний переулок, д.11, стр.1.
Тел.: (495) 783 26 80, Факс:(495) 783 26 81